

**ANTI-Sifilis Test****Test rapid tip Strip pentru determinarea Anticorpilor anti-Sifilis din ser / plasma****Cod SN 4.1**

**Principiul:** Testul este imunocromatografic tip sandwich destinat determinării anticorpilor anti-sifilis din ser sau plasma. Este test rapid (10 - 20 min.), destinat uzului profesional, având un înalt grad de specificitate și de sensibilitate. Kitul este conceput pentru unică utilizare, în laboratoarele de analize medicale, fiind de uz profesional.

**Materiale prevăzute în trusă:**

1. Un strip în ambalaj individual.
2. Instrucțiuni de utilizare.

**Condiții de păstrare:** Stripul se poate păstra la temperatura camerei până la data înscrisă pe ambalaj. A se păstra ferit de lumină puternică, umezeală sau căldură.


**Recoltarea și păstrarea probei:**

**Serul:** poate fi obținut prin metodele uzuale standard (nu se folosesc anticoagulanți). Evitați serurile ce conțin precipitate. Dacă proba nu poate fi testată în ziua recoltării, poate fi păstrată timp de 3 zile la 2 – 8°C, iar pentru perioade mai lungi se recomandă congelarea la – 20°C. Evitați congelarea și decongelarea repetate. Înainte de testare probele se aduc la temperatura camerei.


**Norme de securitate:** utilizatorul acestui test trebuie să respecte toate normele de securitate prevăzute de Ministerul Sănătății pentru cazurile în care se manipulează material potențial infectant, purtător de boli transmisibile. Nu folosiți testul după data expirării. Nu se folosește stripul decât pentru o singură determinare.

**Tehnica de lucru:**

1. Se scoate stripul din ambalaj și se apucă de masca de protecție colorată;
2. Se introduce stripul în proba de analizat, cu săgeata desenată orientată în jos, până la linia de demarcare. Se ține stripul în probă, în poziție verticală, timp de cel puțin 10 secunde. Atenție: nu depășiți linia de demarcare.
3. Se scoate stripul din probă și se așează pe o suprafață curată și non-absorbantă.
4. Se citește rezultatul în 15 min. Atenție: nu depășiți 30 min.

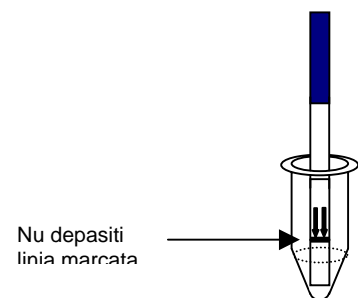

**Interpretarea rezultatelor:** odată cu începerea desfășurării testului, o linie roz va apare în zona de control, **C**, a ferestrei de citire – **linia de control**. Atenție! Această linie trebuie să apară la toate probele pe care le veți analiza! Dacă această linie nu apare, testul este invalid și trebuie repetat. Apariția unei linii roz în zona de test, **T**, a ferestrei de citire indică faptul că rezultatul este pozitiv.

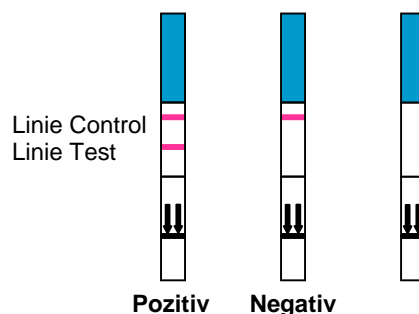

**Rezultatul pozitiv:** este dat de prezența a doua linii roz în fereastra de citire.

**Rezultatul negativ:** este dat de prezența unei singure linii roz în zona de control (superioară) a ferestrei de citire.

**Rezultatul invalid:** în absența oricărei linii. Aceasta înseamnă că a avut loc o greșeală în modul de lucru sau că reactivii de testare au fost deteriorați. În acest caz trebuie refăcut testul cu un strip nou.

**Limitele testului:** deși acest test are o acuratețe foarte mare în detectarea anticorpilor anti-sifilis, există o foarte mică rată a incidenței unor rezultate eronate. Dacă există o mică suspiciune asupra rezultatului, testul trebuie repetat (printr-o metoda superioara de analize, gen ELISA), folosindu-se o nouă probă de ser proaspăt recoltat. Ca și în cazul altor teste de laborator, diagnosticul trebuie interpretat după confruntarea rezultatului testului cu alte investigații și cu datele clinice.

**Mentiuni:**

1. Test screening pentru diagnostic IN VITRO.
2. Nu utilizați testele după data expirării.
3. A se pastra la temperaturi între 15 și 28 °C.